



Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme mit Aloe Vera

Extra-Stark mit Nass-Haftkraft

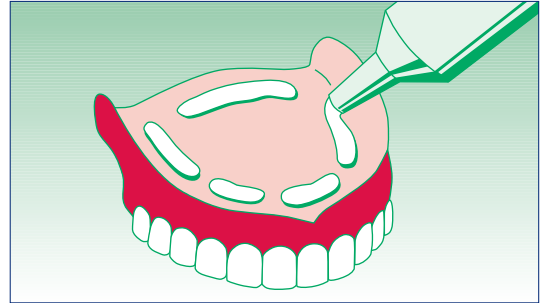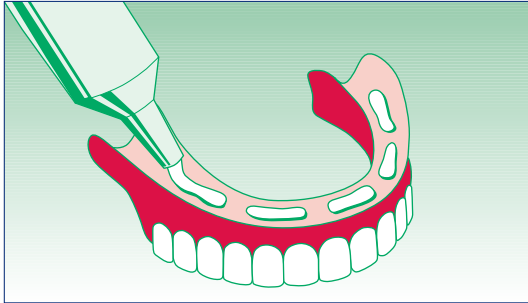

Anwendung

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA enthält: Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäure-anhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Aloe Vera Barbadosis Miller, Siliciumdioxid, Menthol, Azorubin, Methyl-4-hydroxybenzoat.


Queisser
PHARMA



D-24914 Flensburg
www.queisser.de





Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme mit Aloe Vera Extra-Stark mit Nass-Haftkraft

Das aus dem Kern der Aloe Vera Blätter gewonnene Gel besitzt eine Vielzahl bioaktiver Vitalstoffe, die sich in der Kosmetik durch ihre hautpflegenden Eigenschaften ausgezeichnet haben. Dies beruht vor allem auf ihrer intensiv feuchtigkeitsspendenden und zugleich mild pflegenden Wirkung.

Die Protefix® Forschung hat diese positiven Eigenschaften in der **Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA** genutzt. Sie sorgt für ein sicheres Tragegefühl der Dritten und ist gleichzeitig mild pflegend und angenehm für die Mundschleimhaut.

Protefix® Haft-Creme Extra-Stark ALOE VERA kann dank ihrer Nass-Haftkraft problemlos auf die feuchte Prothese aufgetragen werden. Sie wirkt sofort und langanhaltend und gibt Sicherheit und Selbstvertrauen den ganzen Tag – selbst bei schwierigen Haft-Problemen.



Bei Fragen, Problemen oder Anregungen zum Thema Haftmittel schreiben Sie an **Queisser Pharma, Protefix®** Beratungsteam, D-24914 Flensburg. Oder im Internet unter www.protefix.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes
 weil die Prothese sicher und lange haftet
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

Protefix® Haft-Creme Extra-Stark Aloe Vera

- finde ich gut finde ich nicht gut, weil

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und
 verwende **Protefix®** Produkte seit _____ Jahren.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information erhoben, verwendet und genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte mit Ausnahme von Tochtergesellschaften von Queisser Pharma ist ausgeschlossen.

Datum / Unterschrift _____

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: Queisser Pharma, D-24914 Flensburg. Wir nutzen Ihre Angaben streng **vertraulich** zur ständigen Produkt-Verbesserung. Bei Anfragen Ihrerseits setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Wenn Ihnen die telefonische Beantwortung recht ist, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

